


## ISTRUZIONI D'USO FILTRI

### Sostituzione del Prefiltro PAF-0036

Si consiglia di sostituire il prefiltro ogni giorno. Prima di aprire il coperchio del filtro e rimuovere il prefiltro, pulire l'esterno del respiratore CleanSpace2™ con una salviettina umidificata o un panno umido per impedire eventuale contaminazione delle parti interne della Centralina.

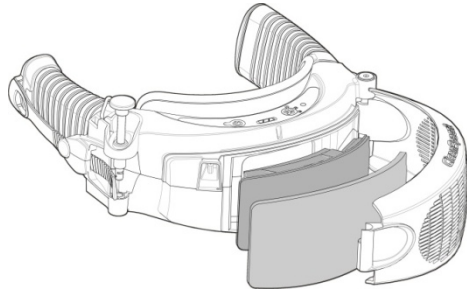

- Per sbloccare il coperchio del filtro sollevare il perno situato all'estremità del coperchio del filtro.
- Il coperchio del filtro dovrebbe facilmente aprirsi esponendo il prefiltro CleanSpace2™ esaurito. Rimuovere il prefiltro esaurito e sostituirlo con uno nuovo, facendo attenzione a non spostare il filtro anti-polvere. Chiudere il coperchio del filtro e premere il perno verso il basso finché non scatta in posizione.

**NON FORZARE L'APERTURA DEL COPERCHIO DEL FILTRO A OLTRE 90°**

### Sostituzione del Filtro anti-polvere PAF-0035


Il filtro anti-polvere deve essere sostituito quando l'allarme del filtro CleanSpace2™ avvisa l'utilizzatore che il filtro è esaurito. Per sbloccare il coperchio del filtro sollevare il perno situato all'estremità del coperchio. Il coperchio del filtro dovrebbe facilmente aprirsi esponendo il filtro CleanSpace™ esaurito. Rimuovere il filtro esaurito (e prefiltro, se applicabile) e sostituirlo con un nuovo filtro antipolvere CleanSpace™ ed il prefiltro. Chiudere il coperchio del filtro e premere il perno verso il basso finché non scatta in posizione.

### Sostituzione dei Filtri che necessitano l'adattatore PAF-0038

Se si utilizza un filtro di tipo nuovo (diverso dal PAF-0035) per la prima volta, assicurarsi che l'adattatore del filtro sia montato. Per istruzioni sul montaggio dell'adattatore per filtri consultare nostro sito web ([www.paftec.com](http://www.paftec.com)).

#### STEP 1. Rimozione del filtro dall'adattatore


- Capovolgere CleanSpace2. Usando il pollice, sganciare il fermo e allontanarlo dal filtro. Il filtro può ora essere rimosso.

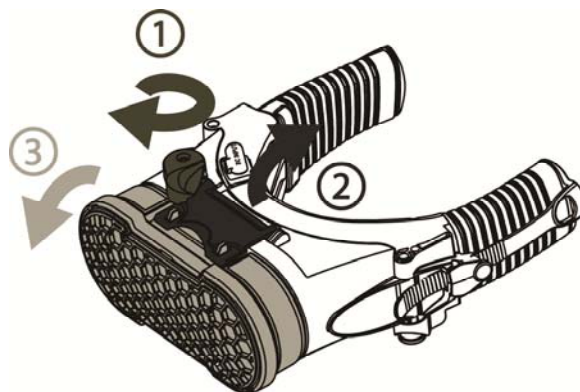

## ISTRUZIONI D'USO FILTRI


### STEP 2. Montaggio del nuovo filtro sull' adattatore

- Tenere il nuovo filtro con il sigillo azzurro posizionato verso l'adattatore. Posizionare le due nervature sul corpo del filtro sopra le fessure nella parte superiore dell'adattatore e spingere il filtro in sede.
- Far scattare il fermo saldamente sulle 2 nervature che si trovano sulla parte inferiore del corpo del filtro. Sentirete 2 clic quando il filtro è posizionato correttamente. Nota: Il blocco fermo si sposterà di lato automaticamente.
- Il filtro è ora sigillato al respiratore e pronto all'uso.

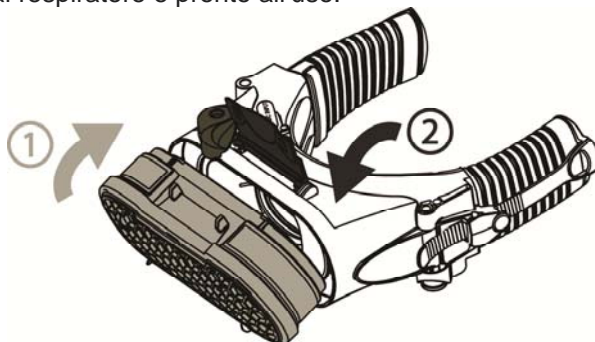

### Inserzione di un nuovo prefiltro PAF-0043

Per I filtri combinati (PAF-0044, PAF-0046, PAF-0047) anche il prefiltro deve essere sostituito quando l'allarme del filtro cleanspace2™ allerta l'utilizzatore che il filtro anti-polvere è esaurito.

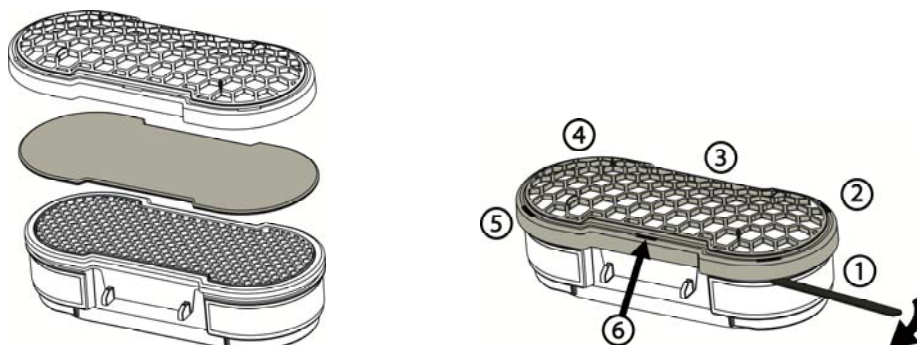

- Sollevare il coperchio a scatto dal filtro utilizzando qualsiasi leva piatta nei sei punti indicati nello schema di cui sopra.
- Sostituire il prefiltro. Assicurarsi che il prefiltro sia posizionato correttamente con la descrizione "THIS SIDE TO RESPIRATOR" posizionata verso il respiratore.
- Riposizionare il coperchio a scatto e premere le 6 posizioni indicate decisamente fino a sentire un "click".
- Il prefiltro è ora sigillato al filtro gas ed è pronto all'uso.

<b>Notified Body:</b>	SAI Global Assurance Services Ltd (Number 2056)	PO Box 6236, Milton Keynes, MK1 9ES, UK
<b>Approvals:</b>	EN 12942	CE 2056 AS/ NZS 1716:2012